



## Cabeçal para joelho (Código do Produto 53590) - TRAUMATISMO

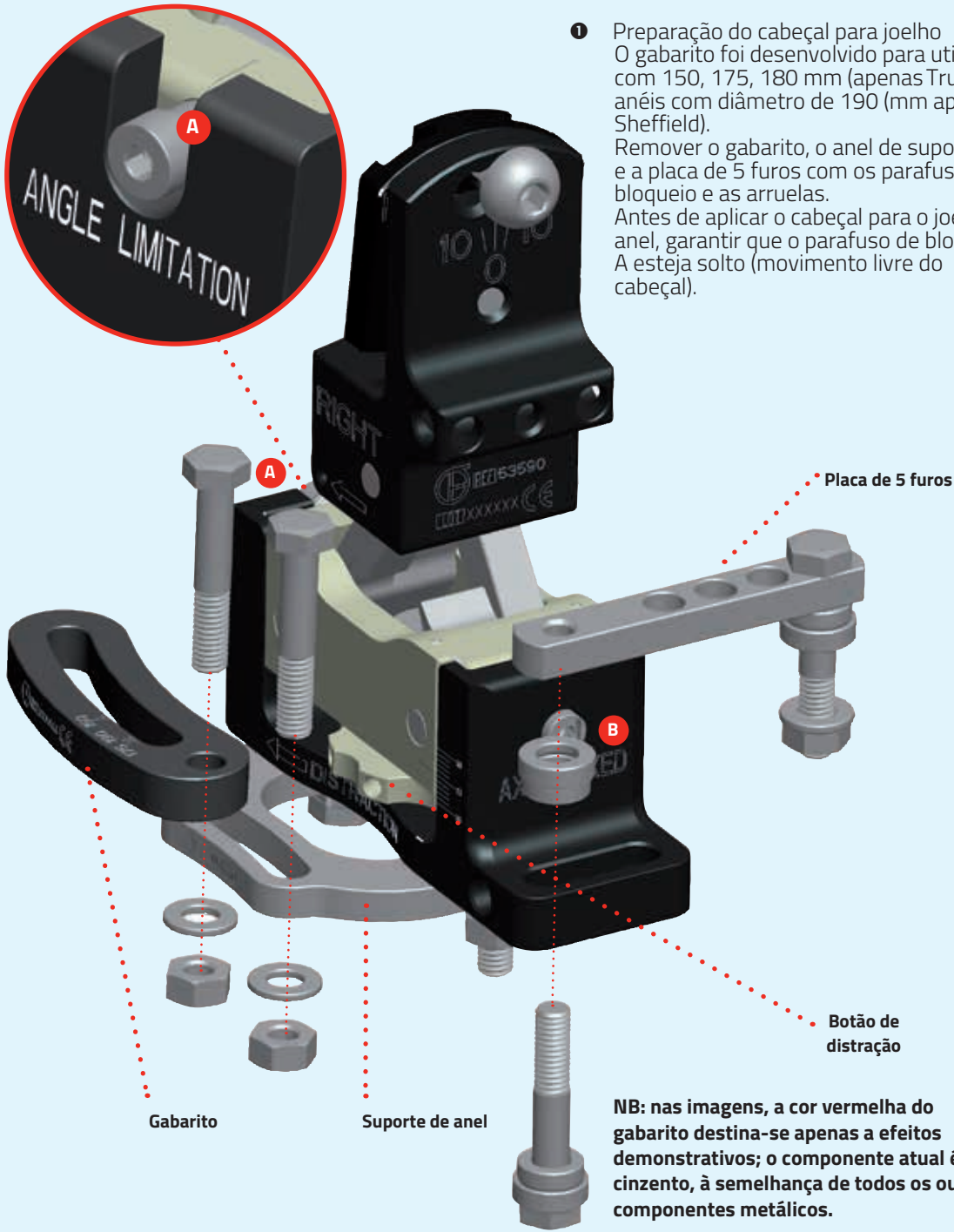


**1** Preparação do cabeçal para joelho  
O gabarito foi desenvolvido para utilização com 150, 175, 180 mm (apenas TrueLok); anéis com diâmetro de 190 (mm apenas Sheffield).  
Remover o gabarito, o anel de suporte e a placa de 5 furos com os parafusos de bloqueio e as arruelas.  
Antes de aplicar o cabeçal para o joelho no anel, garantir que o parafuso de bloqueio A esteja solto (movimento livre do cabeçal).

**NB:** nas imagens, a cor vermelha do gabarito destina-se apenas a efeitos demonstrativos; o componente atual é cinzento, à semelhança de todos os outros componentes metálicos.


**2** Posicionamento do gabarito



**2** Anel TrueLok: alinhe a marcação do gabarito correspondente ao diâmetro do anel utilizado com a linha medial.  
Anel Sheffield: ao bloquear o gabarito, usar o 5º furo do anel com 150 mm de diâmetro ou o 4º furo do anel de 175 ou 190 mm de diâmetro.

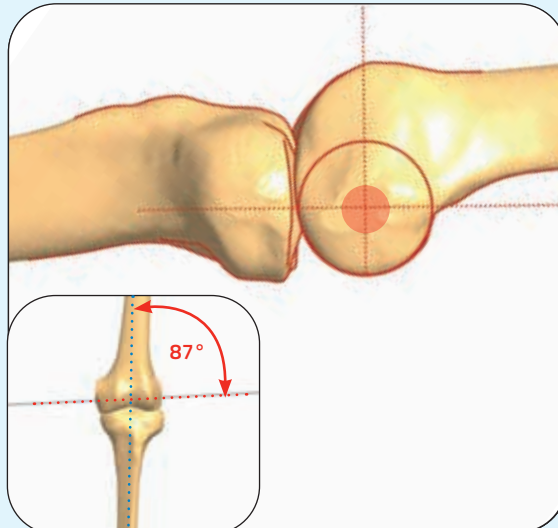

**4** Após estabilização da tíbia com os fios K e/ou pinos, identificar o eixo de referência do joelho e inserir o fio K. Aplicar o cabeçal para joelho através deste fio, garantindo que os parafusos de bloqueio A e B estejam soltos. Dependendo do membro a tratar, a inscrição ESQUERDO ou DIREITO deve ficar voltada para o cirurgião.




**3** Estabilização da tíbia

O gabarito garante que os parafusos ósseos ou os fios não são inseridos na zona de posicionamento do cabeçal para joelho.


**3** Para a estabilização da tíbia, por favor, consultar o manual 12B de Sheffield ou TL-1001-OPT para mais informação sobre o Sistema de Fixação circular TrueLok.

**5**

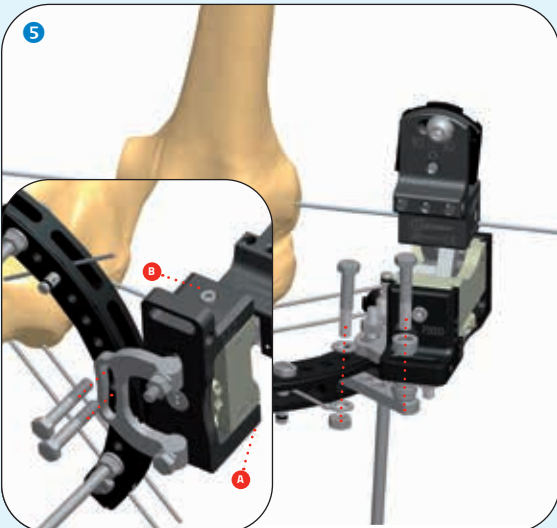


**5** Anel Sheffield: retire o gabarito antes de aplicar o cabeçal para joelho.  
Anel TrueLok: aplique o cabeçal para joelho por cima do gabarito, o que aumentará a altura e permitirá o bloqueio total do cabeçal para joelho através dos parafusos.

**6** Inserção de pinos femorais

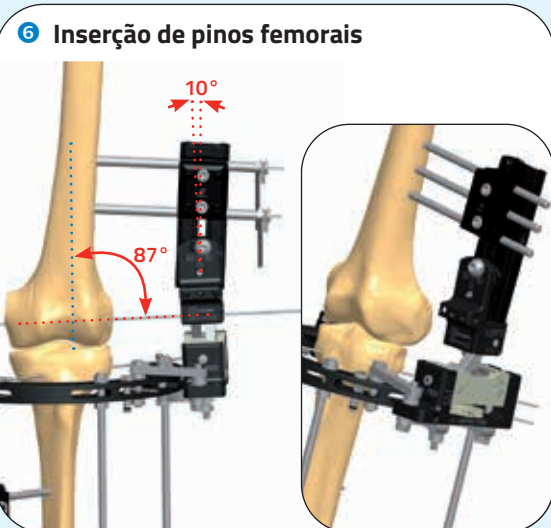


**6** Insira o trilho com um cabeçal reto.  
Insira 2 guias de fio e fios K.  
Retire o fio de referência.  
Verifique a flexão-extensão do joelho em ambos os planos sob intensificação da imagem.  
Insira os pinos femorais.


## LUXAÇÃO DO JOELHO

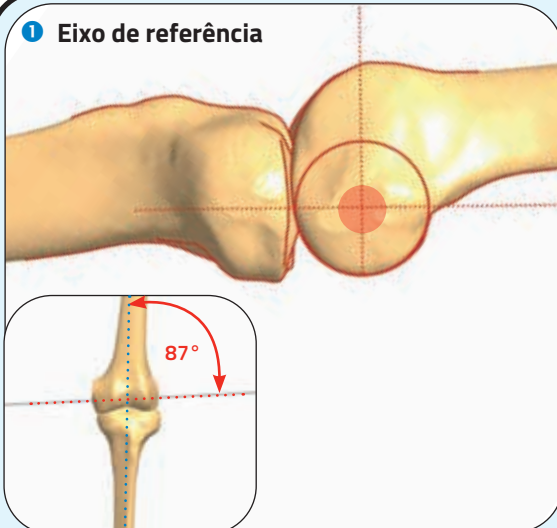


**1 Eixo de referência**

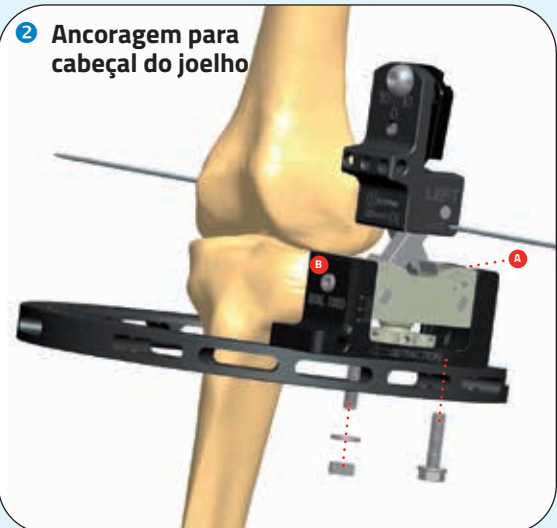


**2 Ancoragem para cabeçal do joelho**

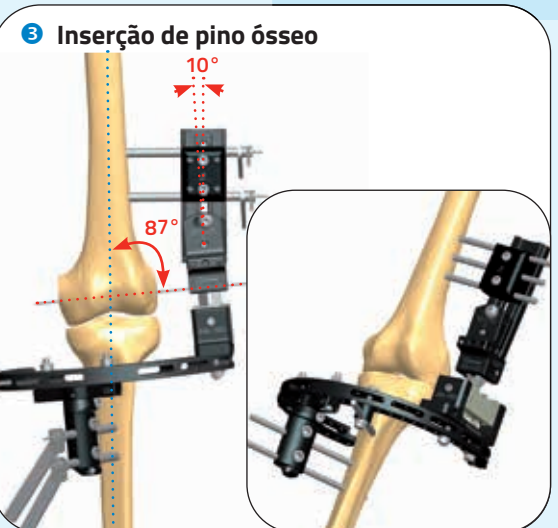

**3 Inserção de pino ósseo**



**4 Distração da Articulação do Joelho**



**5 Uso de unidade CD**

**1** Insira o fio K no eixo de referência.

**2** Aplique o cabeçal para joelho através deste fio, certificando-se de que os parafusos de bloqueio A e B estão soltos. Dependendo do membro a tratar, a inscrição ESQUERDO ou DIREITO deve ficar voltada para o cirurgião. Anel Sheffield: fixe o cabeçal para joelho diretamente no anel. Anel TrueLok: fixe o cabeçal para joelho diretamente ao anel, usando o kit TM ADV TrueLock para a ancoragem em anel (53034).

**3** Insira o trilho com um cabeçal reto. Insira 2 guias de fio e fios K. Encaixe o cabeçal Sheffield no anel da face medial da tíbia e insira 2 guias de fio e fios k. Retire o fio de referência. Verifique a flexão-extensão do joelho em ambos os planos sob intensificação da imagem. Insira os pinos ósseos.

**4** É possível fazer a distração da articulação do joelho girando o distrator.

**5** A amplitude de movimentos do joelho pode ser aumentada utilizando a unidade de compressão-distração.

Fabricado por:  
**ORTHOFIX Srl**  
 Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo  
 (Verona), Itália  
 Telefone +39 045 6719000,  
 Fax +39 045 6719380  
 www.orthofix.com



**orthofix.com**  
 LR-1004-QR-BR CA 10/22

O seu distribuidor é:

**Orthofix do Brasil Ltda**

Alameda Santos, 1978 – 16º and. – SI 162  
 Cerqueira César - 01418-102  
 São Paulo – SP, Brazil

Telefone +55 11-3087-2266  
 Fax +55-11-3087-2266 ext.2309

 **ORTHOFIX®**  
 ORTHOPEDICS