
Snodo Articolato per il Ginocchio (Codice prodotto 53590) - TRAUMA

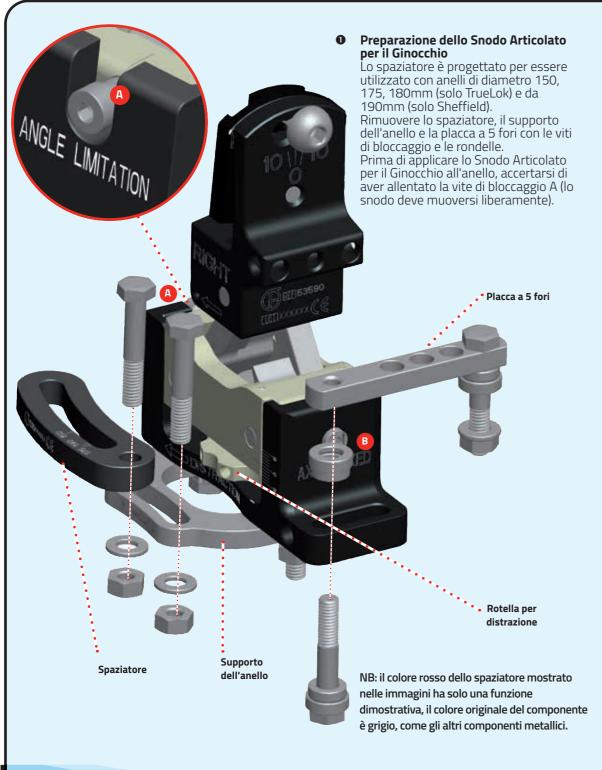

2 Posizionamento dello spaziatore

Anelli TrueLok:

Anelli TrueLok:

Anelli Sheffield:


anello da 150mm, foro n. 3

anello da 175mm, foro n. 4

anello da 175mm, foro n. 4

Anello TrueLok: allineare i contrassegni dello spaziatore con la linea mediale dell'anello, in corrispondenza del diametro dell'anello utilizzato.

Anello Sheffield: per bloccare lo spaziatore, utilizzare il quinto foro negli anelli da 150mm o il quarto foro con anelli da 175 o 190mm di diametro.

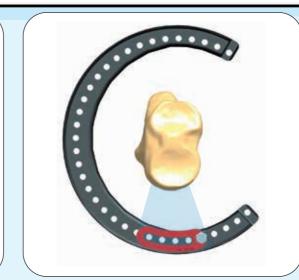


Lo spaziatore permette di evitare che le viti o i fili vengano inseriti nell'area in cui è posizionato lo Snodo articolato per il Ginocchio.



Per la stabilizzazione tibiale si rimanda al Manuale 12B per il sistema di fissazione ad anelli Sheffield o alla tecnica operatoria TL-1001-OPT per il sistema di fissazione ad anelli TrueLok.




Dopo aver stabilizzato la tibia con fili di Kirschner e/o viti, individuare l'asse di riferimento del ginocchio e inserire un filo di Kirschner. Applicare lo Snodo Articolato per il Ginocchio sul filo, accertandosi di aver allentato le viti di bloccaggio A e B. In base all'arto sottoposto a trattamento, l'indicazione LEFT o RIGHT dovrà essere rivolta verso il chirurgo.

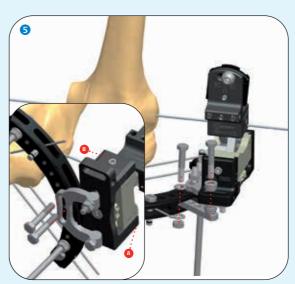

Anello Sheffield: rimuovere lo spaziatore prima di applicare lo Snodo Articolato per il Ginocchio.


Anello TrueLok: applicare lo Snodo Articolato per il Ginocchio allo spaziatore, aumentando in tal modo l'altezza e consentendo di bloccare completamente lo snodo per ginocchio con i bulloni.

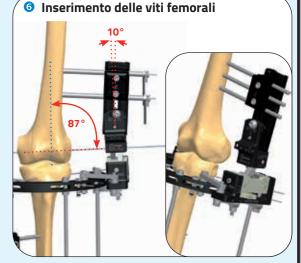

Inserire la slitta con un morsetto retto. Inserire 2 guide e 2 fili di Kirschner. Rimuovere il filo di riferimento. Verificare flessione ed estensione del ginocchio in entrambi i piani con l'amplificatore di brillanza. Inserire le viti femorali



LUSSAZIONE DEL GINOCCHIO

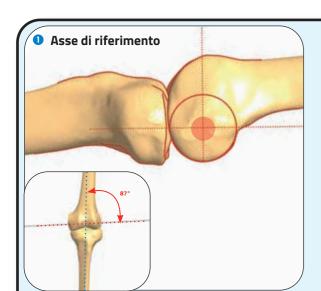


• Inserire un filo di Kirschner nell'asse di riferimento



Applicare lo Snodo Articolato per il Ginocchio sul filo, accertandosi di aver allentato le viti di bloccaggio A e B. In base all'arto sottoposto a trattamento, l'indicazione LEFT o RIGHT dovrà essere rivolta verso il chirurgo.


Anello Sheffield: applicare lo Snodo Articolato per il Ginocchio direttamente all'anello.

Anello TrueLok: applicare lo Snodo Articolato per il Ginocchio direttamente all'anello usando il Kit LRS ADV TrueLokTM per connessione all'anello (53034).

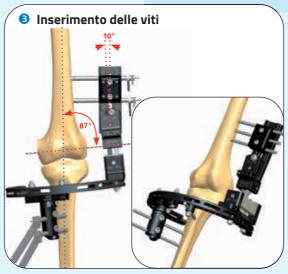


Inserire la slitta con un morsetto retto. Inserire 2 guide e 2 fili di Kirschner applicare un morsetto Sheffield all'anello sulla parte distale della tibia e inserire 2 guide e due fili di Kirschner.

Rimuovere il filo di riferimento. Verificare flessione ed estensione del ginocchio in entrambi i piani con l'amplificatore di brillanza. Inserire le viti.

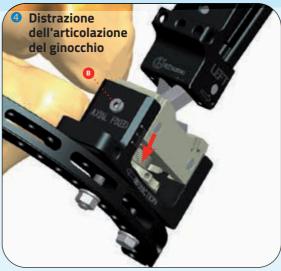

• La distrazione dell'articolazione del ginocchio è possibile ruotando la rotella per distrazione.

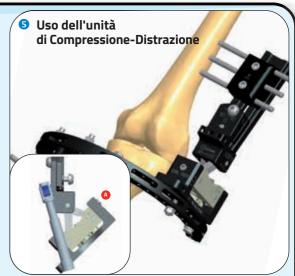

 È possibile aumentare la mobilità del ginocchio usando l'unità di compressione-distra-



Prodotto da:
ORTHOFIX SrI
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo
(Verona) Italia
Telefono +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380
www.orthofix.com

(ξ_{0123}

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR) Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370

